


## راهنمای نصب نرم افزار CODA e-STUDIO


خواهشمند است مراحل نصب را مرحله به مرحله طبق روش زیر انجام دهید.

- 1- سی دی مربوطه را داخل درایو بگذارید
- 2- پوشه CODA e-STUDIO را از داخل درایو سی دی باز کرده، روی فایل مربوطه دو بار کلیک کنید. (شکل ۱)

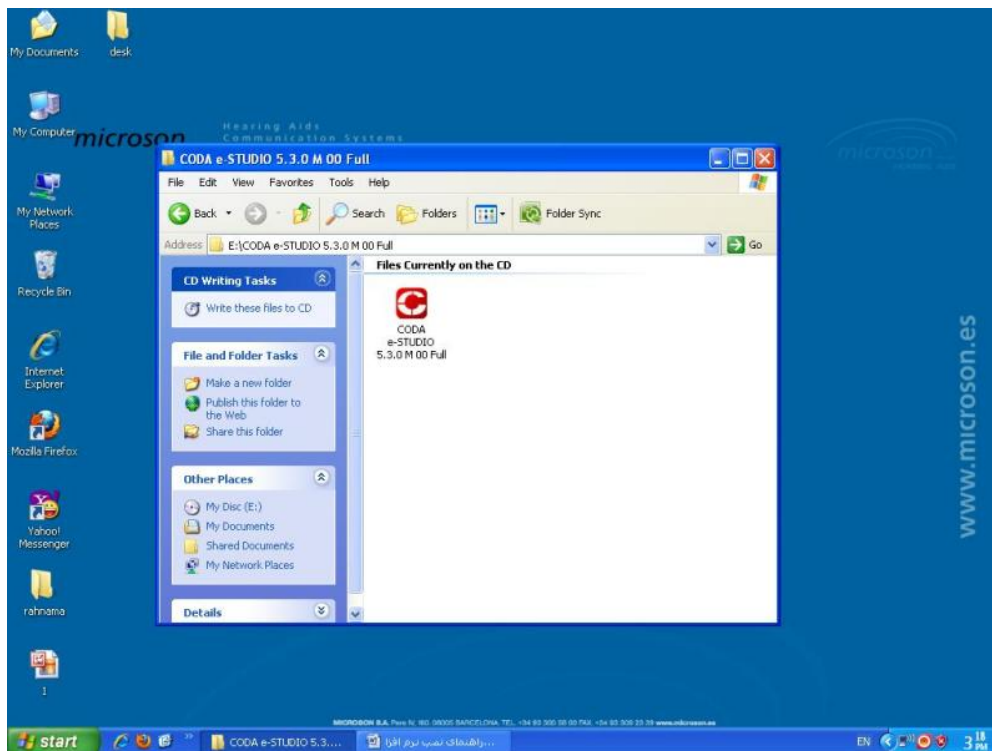


(شکل ۱)

- 3- در پنجره زیر English را انتخاب و سپس کلید OK را بزنید (شکل ۲)

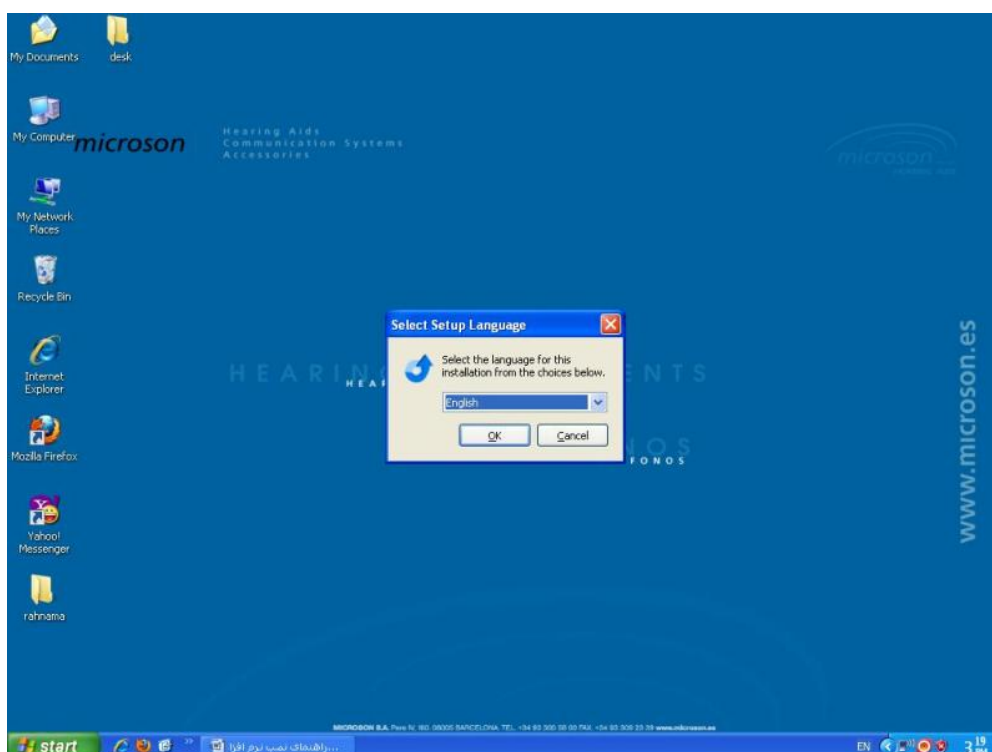


(شکل ۲)

۴- در پنجره زیر کلید Next را کلیک کنید (شکل ۳)

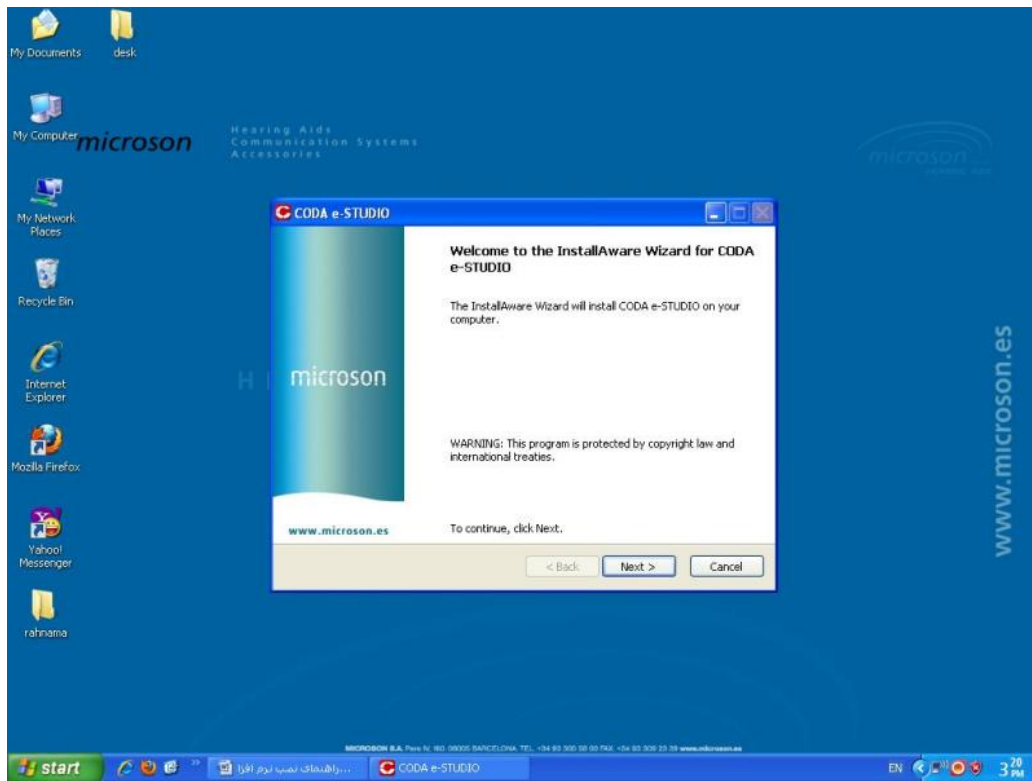


(شکل ۳)

۵- در پنجره زیر در قسمت User name نام خود و در قسمت Organization نام مرکز شنوایی خود را وارد کنید و سپس کلید next را بزنید. (شکل ۴)

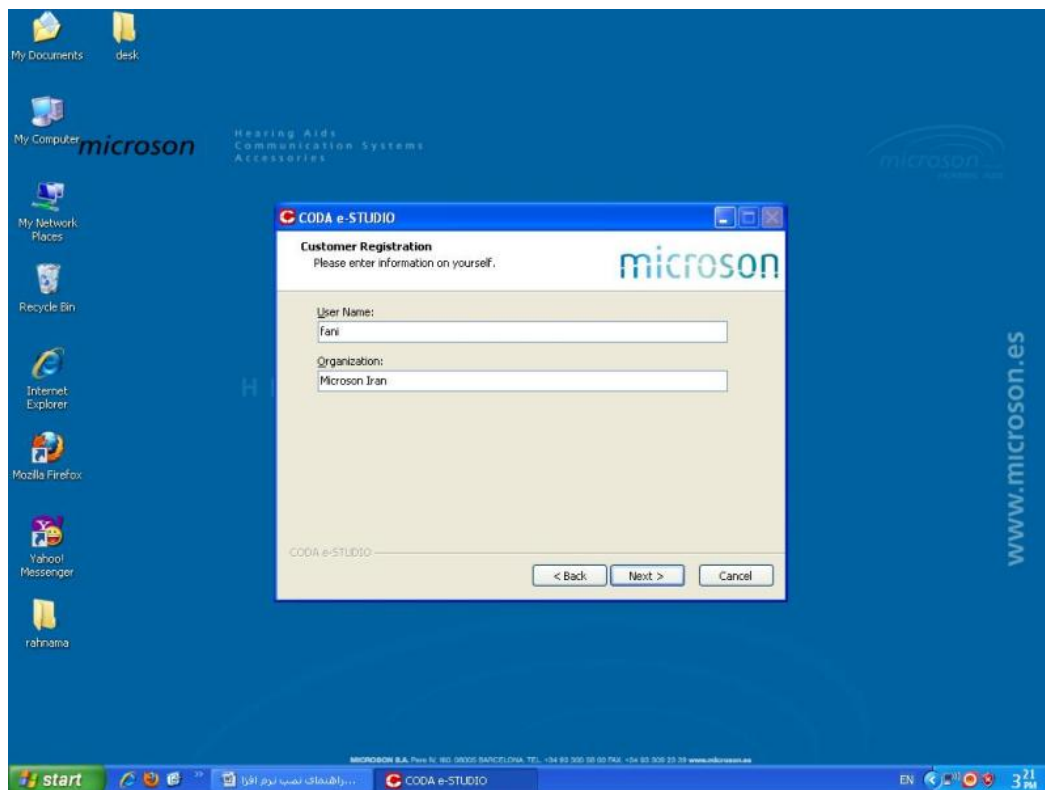


(شکل ۴)

۶- در این پنجره شما می‌توانید درایو نصب را تغییر دهید و یا در همان حالت، next را بزنید. (شکل ۵)

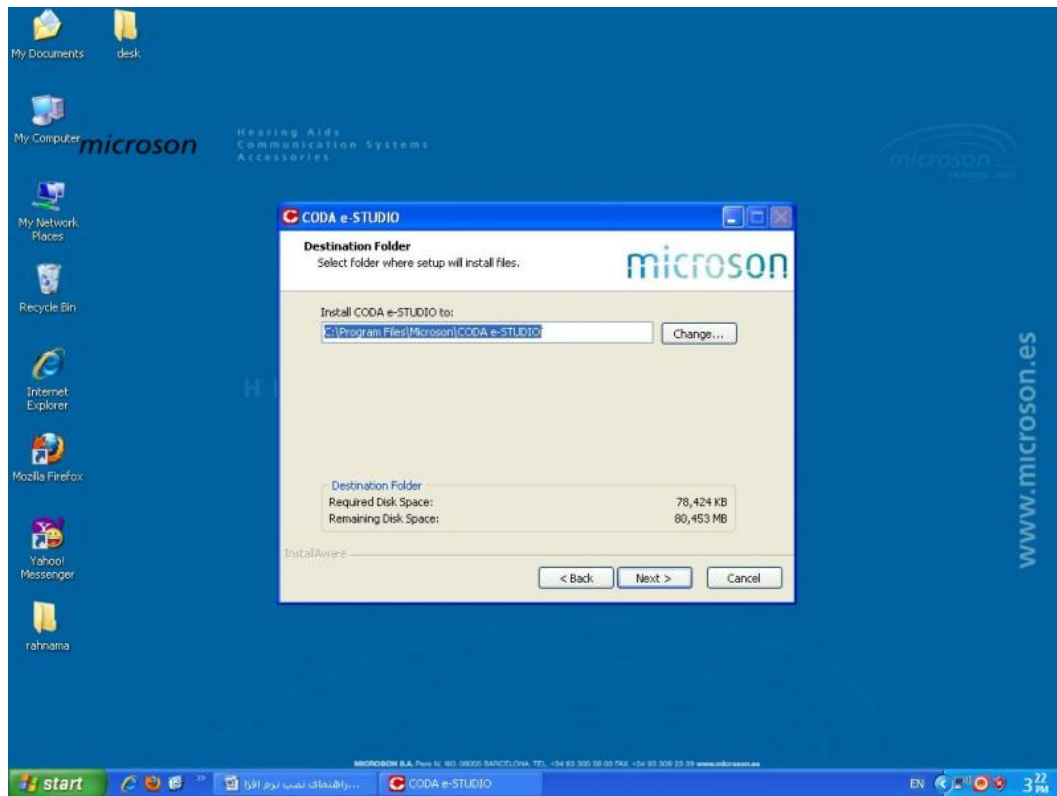


(شکل ۵)

۷- در این پنجره فقط next را بزنید (شکل ۶)

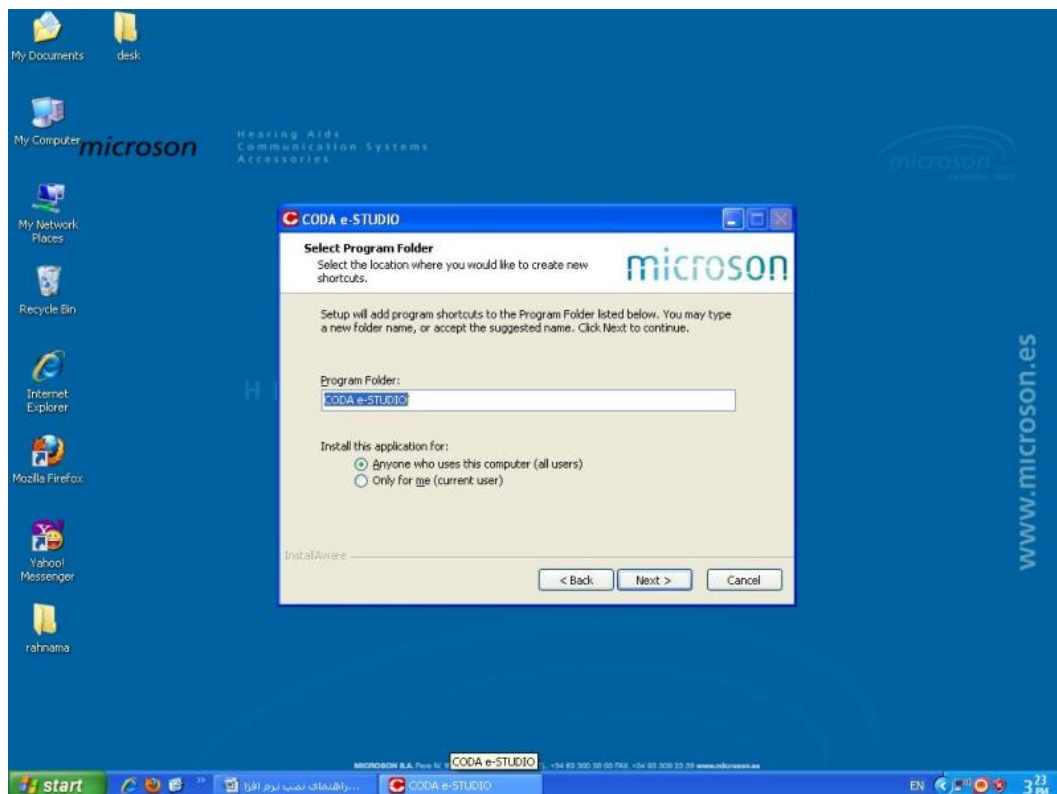


(شکل ۶)

۸- در این پنجره روی next کلیک کنید(شکل ۷)

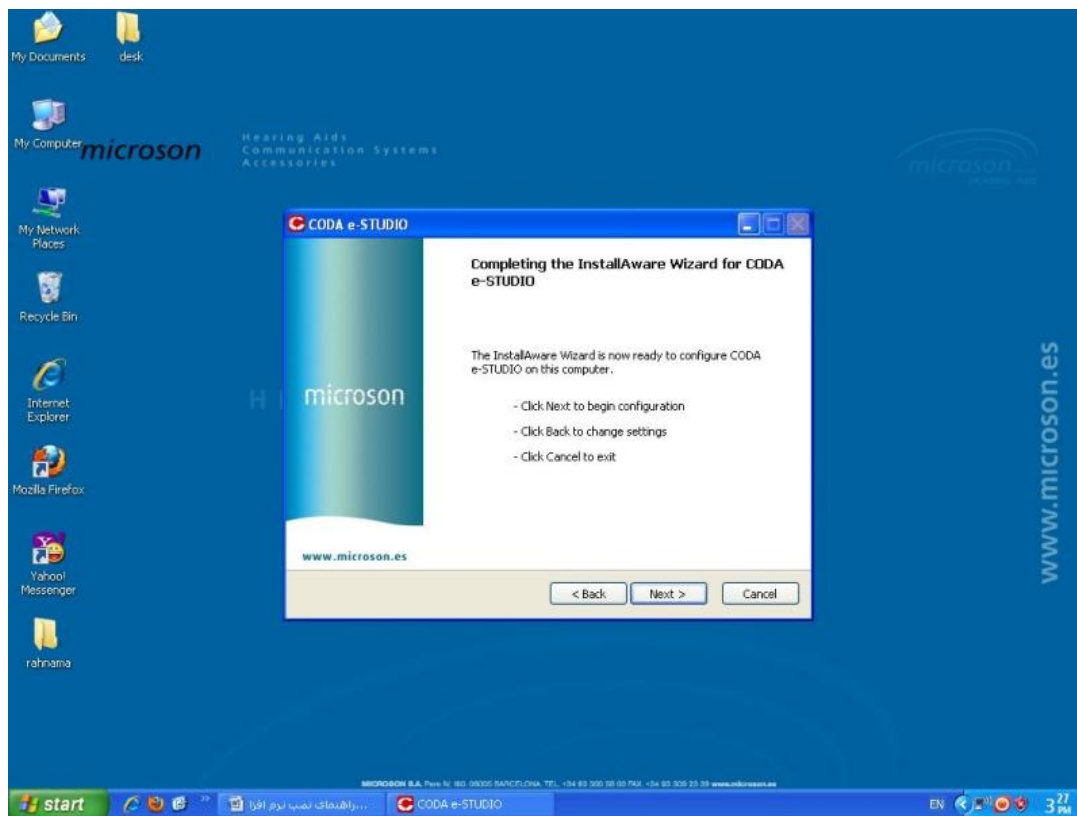

(شکل ۷)


۹- عملیات نصب آغاز می شود لطفاً صبر کنید تا پنجره زیر ظاهر شود سپس روی Finish کلیک کنید(شکل ۸)

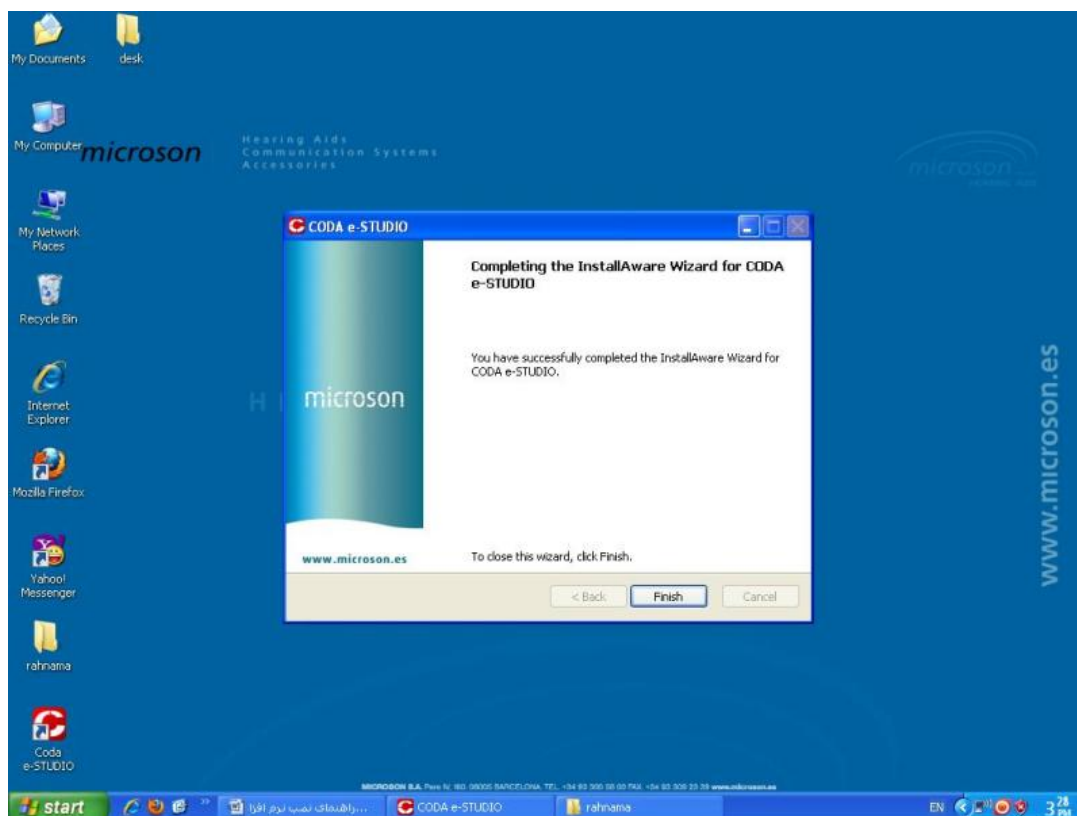

(شکل ۸)


۱۰- برنامه CODA e-STUDIO بر روی کامپیوتر شما نصب گردیده، بر روی آیکون زیر روی Desktop کلیک

کنید.(شکل ۹)

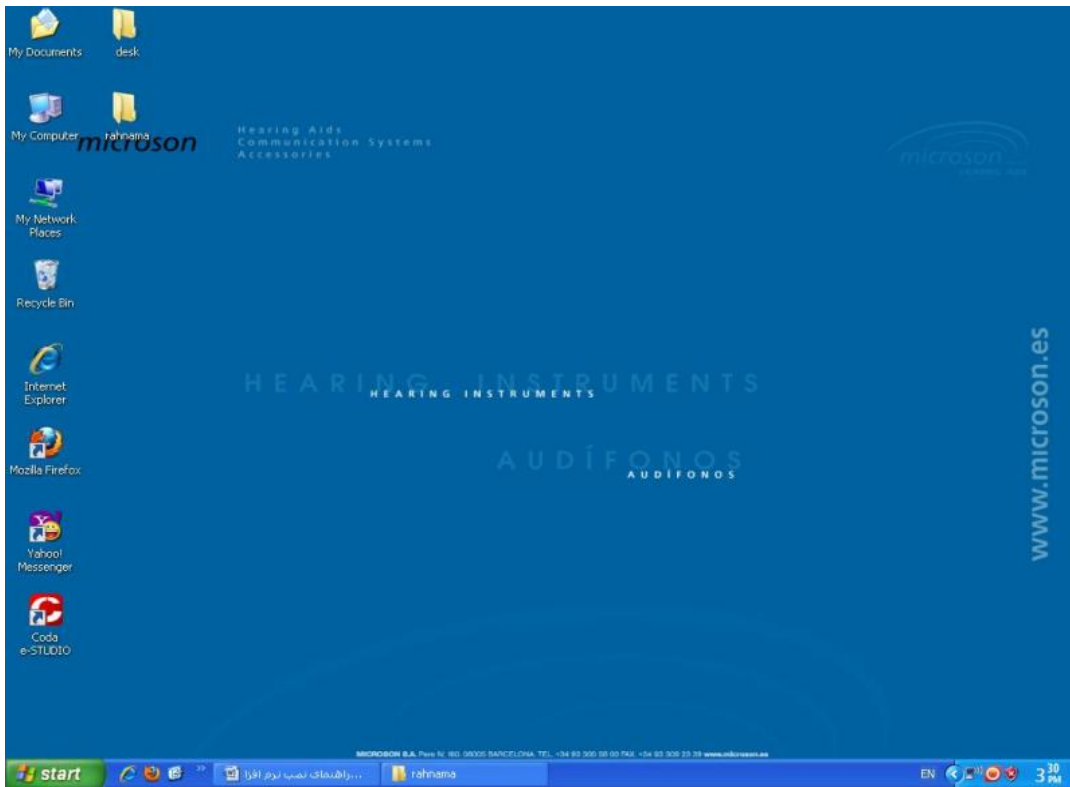


(شکل ۹)

۱۱- در اولین اجرای نرم افزار پنجره زیر را می بینید English را انتخاب کرده و روی next کلیک کنید(شکل ۱۰)

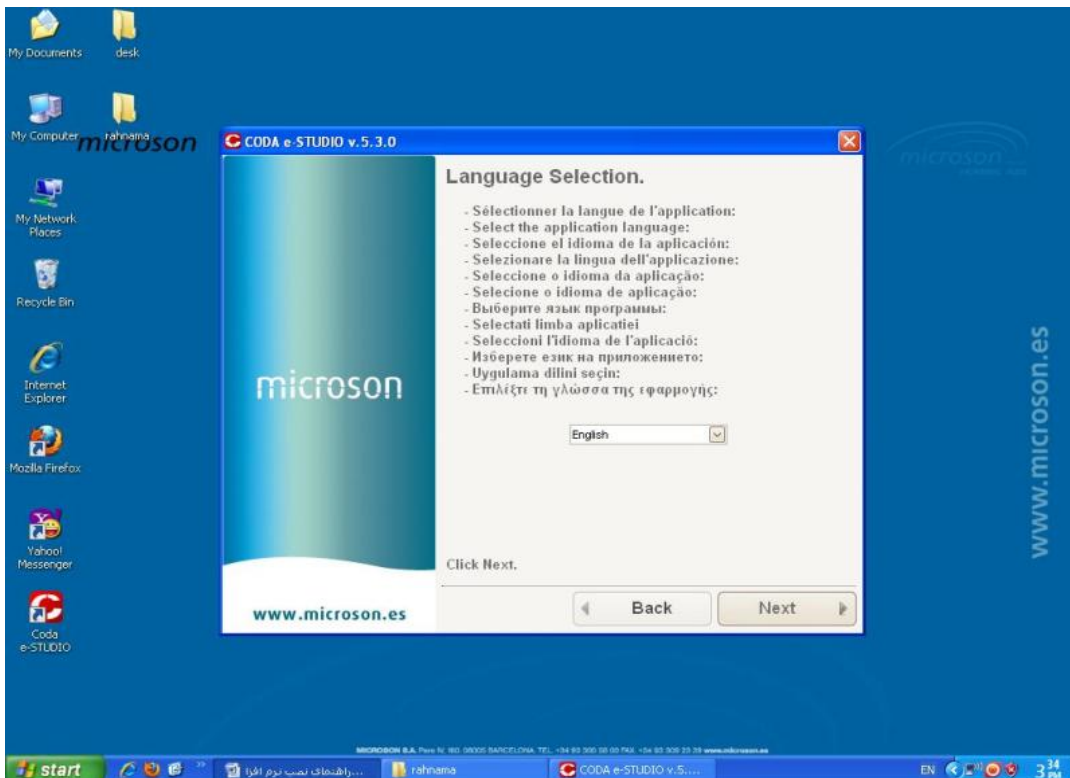


(شکل ۱۰)

۱۲- در این پنجره فقط روی next کلیک کنید(شکل ۱۱)

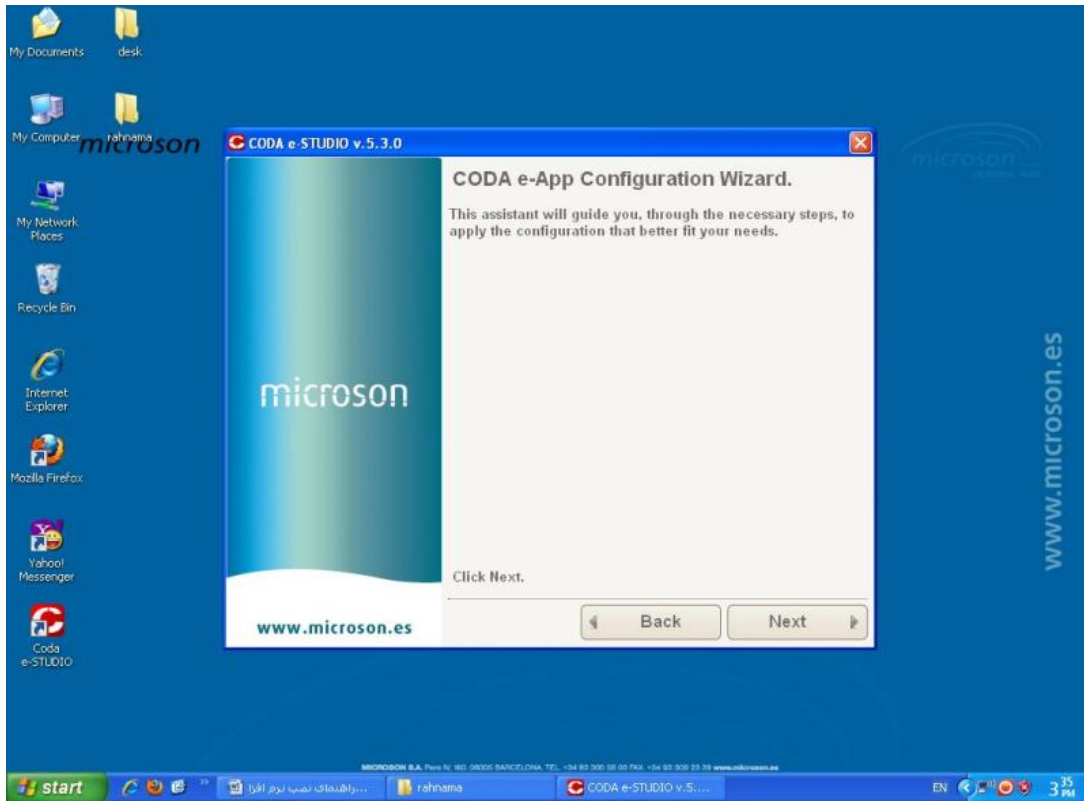

(شکل ۱۱)

۱۳- در این پنجره نوع دستگاه پروگرامر خود را انتخاب کنید(Hi-pro-Microcard-NOAH Link) و روی next کلیک کنید.(شکل ۱۲)

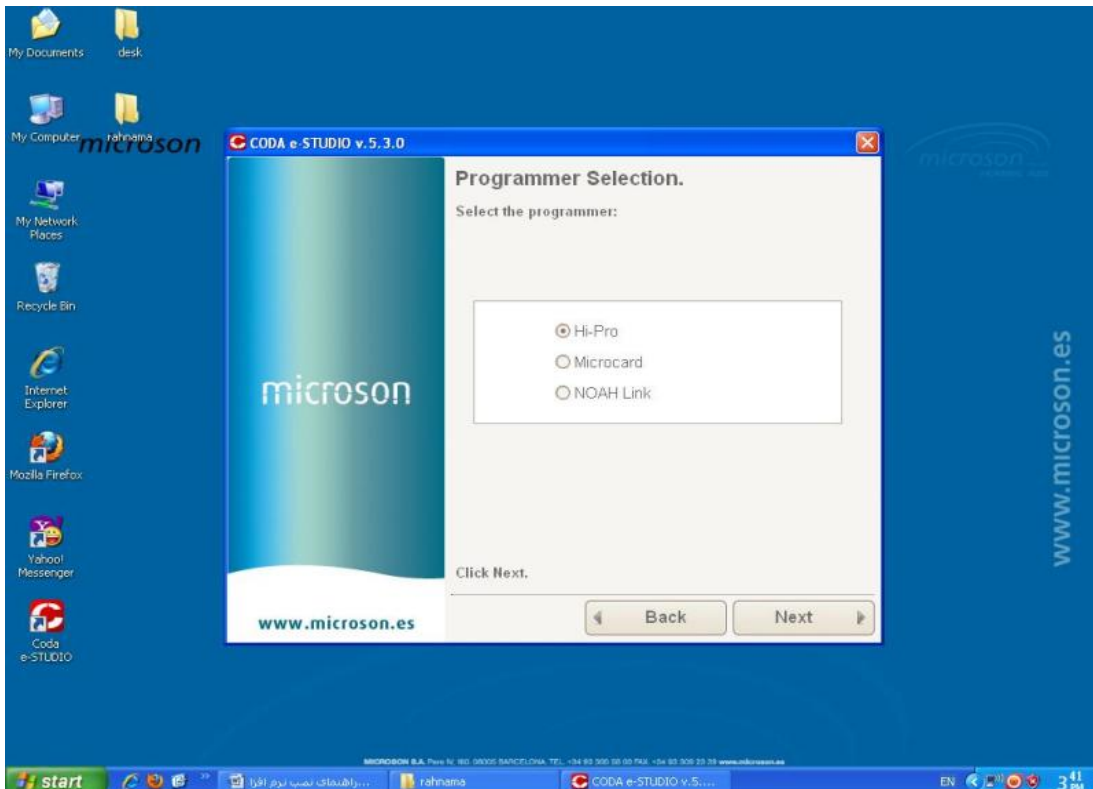


(شکل ۱۲)




۱۴- در این پنجره سطح دسترسی نرم افزار را انتخاب نمائید (Basic, Advanced)

توجه: در سطح Basic شما قادر به اصلاح پارامترهای TK و Cross Over نیستید اگر جهت فیتینگ کردن به تغییر این پارامترها نیاز دارید سطح Advanced را انتخاب نمائید. البته این پارامتر پس از نصب نیز قابل تغییر می باشد. روی Next کلیک کنید. (شکل ۱۳)

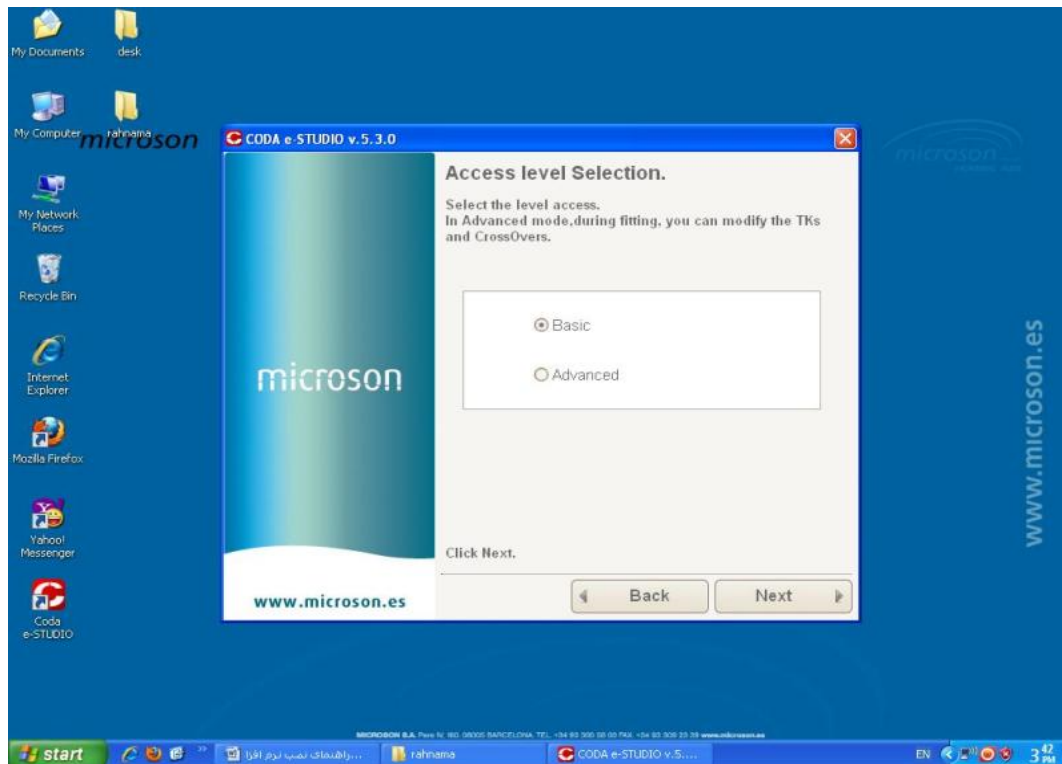


(شکل ۱۳)

۱۵- در این پنجره می توانید نام مرکز شنوایی سنجی خود را وارد کنید و سپس روی Next کلیک کنید. (شکل ۱۴)

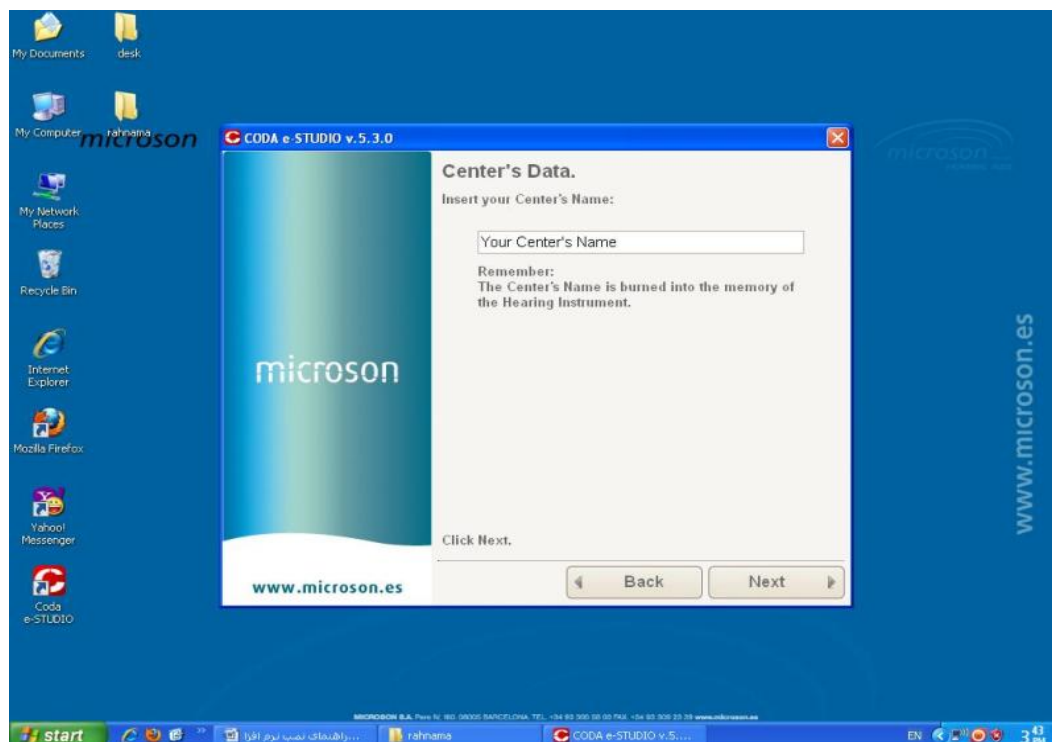

(شکل ۱۴)

۱۶- در این پنجره روی Finish کلیک کنید(شکل ۱۵)

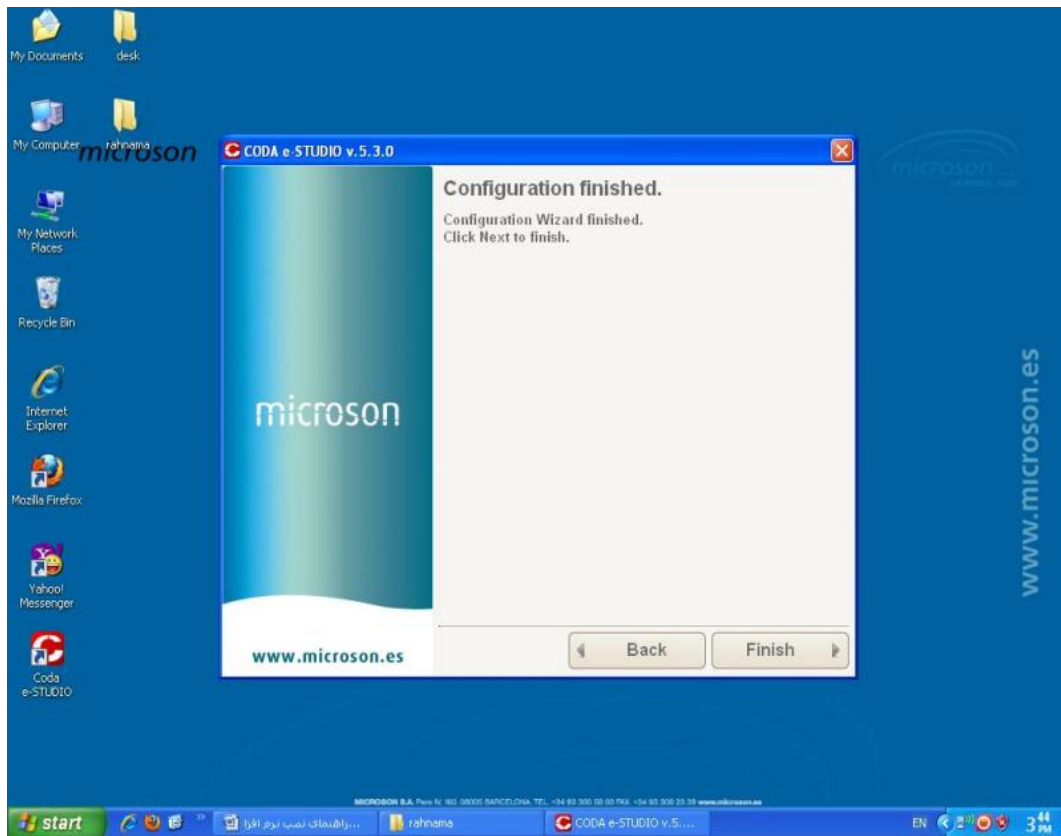

(شکل ۱۵)

مراحل نصب و تنظیم نرم افزار شما به پایان رسید

موفق باشید

شرکت میکروسون ایران